


Assim como um histórico clínico completo, uma coleta de amostra bem feita é fundamental para resultados mais precisos. Os exames sorológicos são fundamentais para o monitoramento, controle e erradicação de doenças. Confira o nosso guia de coleta, evite perdas de amostras e garanta maior precisão nos resultados:

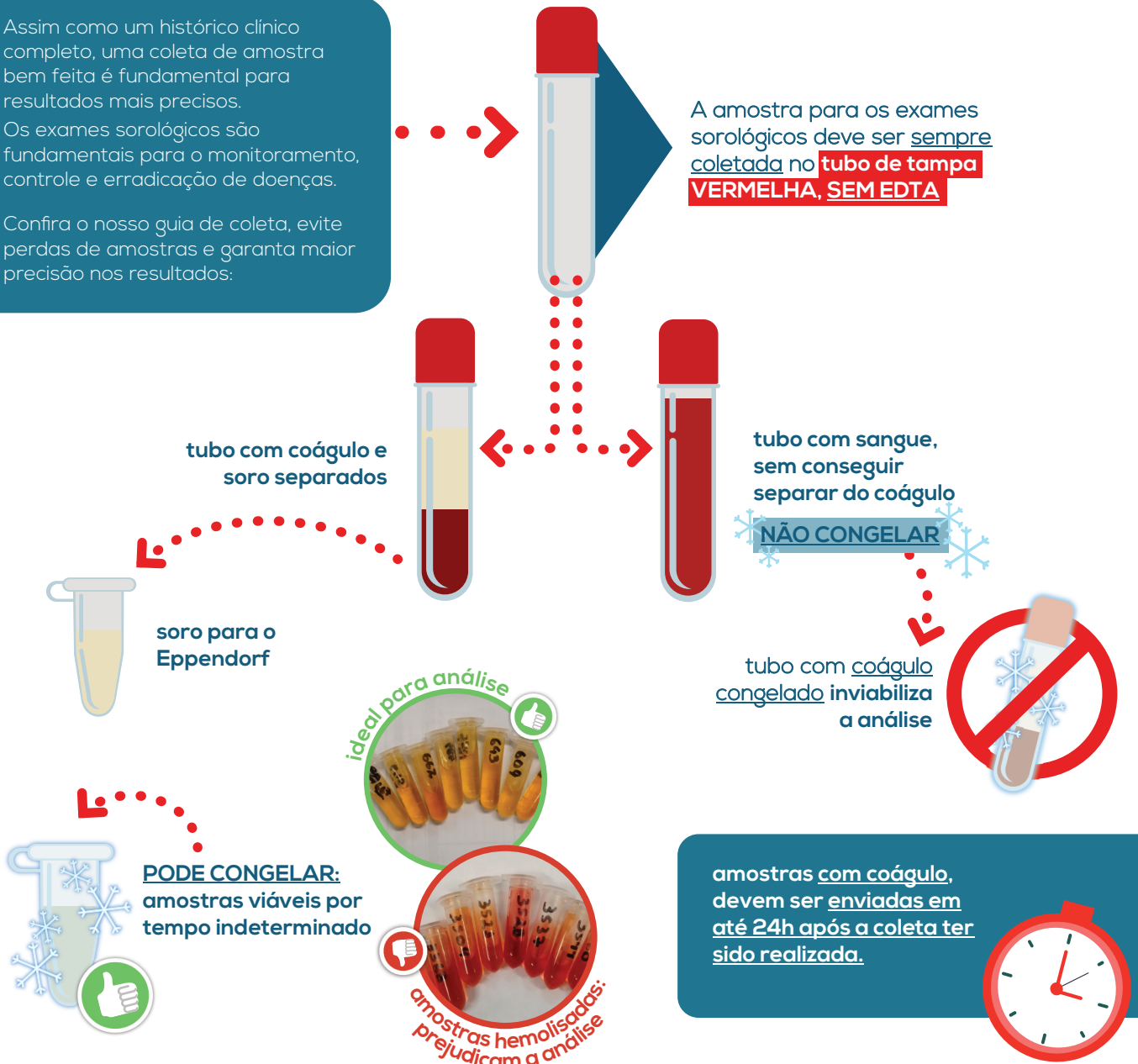

**COMO ACONDICIONAR AS AMOSTRAS PARA ENVIO:**

**EPPENDORF (soro):** envie as amostras identificadas, dentro de saco plástico, em caixa de isopor com gelo em gel.



**TUBO:** envie os tubos identificados em um rack, acomodado de maneira firme, dentro de uma caixa de isopor, com gelo em gel e papéis (use-os para firmar a posição do rack) - as amostras devem balançar o MÍNIMO possível.



**NÃO ENVIE AS AMOSTRAS COM GELO NORMAL:** pois derrete e pode comprometer as amostras!  
**dica:** se você não tem gelo em gel, utilize uma garrafa pet com água congelada para usar de gelo!

**FORMAS DE ENVIAR O MATERIAL PARA O LABORATÓRIO:**



**CORREIOS:**

- verifique o prazo de entrega para manter as amostras refrigeradas
- prefira envios no início da semana
- se precisar: solicite os códigos dos correios



**TRANSPORTADORA:**

- verifique o prazo de entrega para manter as amostras refrigeradas
- verifique se a transportadora atende a cidade de origem e destino



**RODOVIÁRIA E AÉREO:**

- coletas realizadas diariamente, de segunda a sexta e sábados até as 12h
- **avise o laboratório sobre o envio: envie o comprovante do despacho pelo whatsapp e a previsão de chegada em POA**
- esteja atento as medidas das caixas

**ATENÇÃO:**

**TODAS as amostras devem estar IDENTIFICADAS e acompanhadas da requisição de exames devidamente preenchidas.**

[acesse a requisição de exames](#)

**LINKS ÚTEIS:**

[whats sanidade bovina](#)

[requisição de exames](#)

[portfólio de exames](#)

[imprimir destinatário para envio](#)



whats sanidade bovina



portfólio de exames



requisição de exames

impressão de destinatário