


ANTES da coleta:  
uso de pré-dipping  
APÓS a coleta: uso  
de pós-dipping

SÃO NECESSÁRIAS DE 3 A 5 COLETAS, COM INTERVALO DE  
2-3 DIAS ENTRE CADA UMA DELAS:

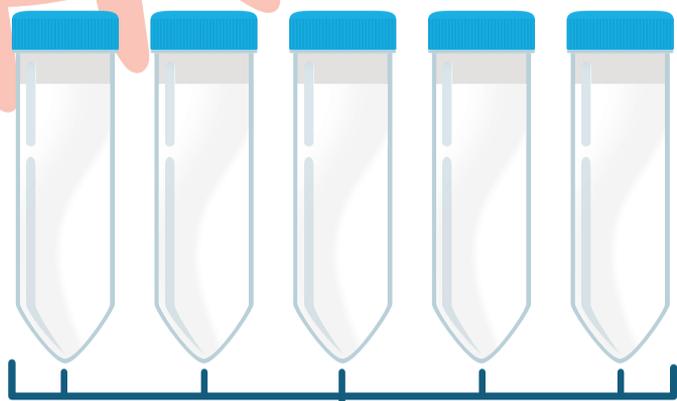


USO DE FALCON ESTÉRIL PARA AS COLETAS:

- para cada dia de coleta = 1 falcon
- usar 1 falcon individual para cada quarto coletado
- ao final do 5º dia FORMAR 1 FALCON único com partes iguais de cada amostra (em torno de 1mL), SEMPRE homogeneizando cada amostra antes.
- conservar as amostras em geladeira ao longo do período de coleta.



identifique o falcon com o número do brinco, data das coletas e quarto mamário coletado

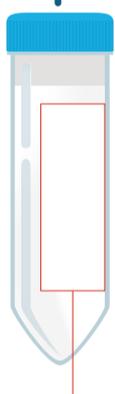

#### ARMAZENAMENTO E ENVIO:

As amostras podem ser congeladas. O armazenamento pode ser feito na geladeira/congelador. O envio deve ser feito em caixa de isopor com gelo em gel



**NÃO ENVIE AS AMOSTRAS COM GELO NORMAL:** pois derrete e pode comprometer as amostras!

**dica:** se você não tem gelo em gel, utilize uma garrafa pet com água congelada para usar de gelo!

## FORMAS DE ENVIAR O MATERIAL PARA O LABORATÓRIO:



#### CORREIOS:

- verifique o prazo de entrega para manter as amostras refrigeradas
- prefira envios no início da semana
- se precisar: solicite os códigos dos correios



#### TRANSPORTADORA:

- verifique o prazo de entrega para manter as amostras refrigeradas
- verifique se a transportadora atende a cidade de origem e destino



#### RODOVIÁRIA E AÉREO:

- coletas realizadas diariamente, de segunda a sexta e sábados até as 12h
- **avise o laboratório sobre o envio: envie o comprovante do despacho pelo whatsapp e a previsão de chegada em POA**
- esteja atento as medidas das caixas

### ATENÇÃO:

TODAS as amostras devem estar **IDENTIFICADAS** e acompanhadas da **requisição de exames devidamente preenchidas.**

[acesse a requisição de exames](#)

## LINKS ÚTEIS:

[whats sanidade bovina](#)

[requisição de exames](#)

[portfólio de exames](#)

[imprimir destinatário para envio](#)



whats sanidade bovina



portfólio de exames



requisição de exames

impressão de destinatário